


Verkorte handleiding Dermalight 1000 UVB lichtpaneel – Het instellen van de tijd.

Op de achterzijde van uw lichttherapie apparaat vindt u de aan/uit schakelaar en de tijds klok.

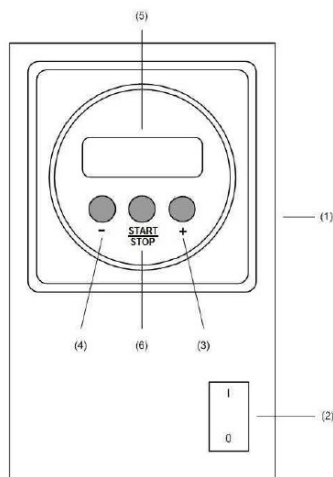

- (1) Behuizing met timer en hoofdschakelaar
- (2) Hoofdschakelaar (aan/uit)
- (3) Knop + voor aanpassing van de behandelingsduur
- (4) Knop - voor aanpassing van de behandelingsduur
- (5) Display: geeft de behandelingsduur aan in minuten:seconden
- (6) Start/Stop-knop = knop waarmee de behandeling gestart en beëindigd wordt

Om de belichtingstijd in te stellen doorloopt u de volgende stappen.

1. Stop de stekker in een geaard stopcontact en zet met behulp van de hoofdschakelaar het apparaat aan.
2. Met behulp van de + en - knopjes op de tijds klok kunt u de gewenste belichtingstijd instellen. De tijd wordt in minuten en seconden aangegeven.
3. Wegens veiligheidsredenen is de maximale therapieduur begrensd op 10 minuten. Moet u langer dan 10 minuten belichten? Stelt u dan eerst 10 minuten in en daarna de rest van de behandelingsduur.
4. Druk op de start/stop-knop om de belichting te starten. Na de ingestelde tijd zullen de lampen automatisch worden uitgeschakeld.
5. Wilt u dezelfde behandelingsduur nogmaals starten, druk dan op de start/stop-knop.
6. Zet na afloop altijd het apparaat uit met behulp van de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact.